


KULLANIM KILAVUZU EHRlich ÇÖZELTİSİ

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
|  | ÜRÜN ADI | : Ehrlich Çözeltisi | |
| | MARKASI | : GBL® ROSE-URI | |
| | ÜRÜN REF NO | : 3125 | |
| | Stok Kodu | Ambalaj Şekli | Birim Ambalaj Hacmi |
| 453125030100 | 125 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm | 125 ml | |
| 453125030250 | 250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe | 250 ml | |
| 453125020500 | 500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm | 500 ml | |

KULLANIM AMACI

İdrarda ürobilinojen ve sterkobilinojen tayininde kullanılır.

TESPİT EDİLEN TÜRLER

Ürobilinojen ve sterkobilinojen varlığı.

FONKSİYONU

Ürün, tanı veya tanıya yardımcı olma amacıyla manuel kullanım için tasarlanmıştır.

GEREKEN NUMUNE TÜRÜ

İdrar.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

Ürobilinojenin asit ortamda p-dimetilaminobenzaldehitte verdiği renk tepkimesine dayanır.

İÇERİK BİLGİSİ

Paradimetil aminobenzaldehid, hidroklorik asit.

BOYAMA METODUNUN UYGULANMASI

1. Bir tüpün içerisine 10 ml idrar koyun.
2. Üzerine 1 ml **Ehrlich Çözeltisi (GBL Stok Kodu 453125020500)** ekleyin.
3. Birkaç dakika bekleyin. Eğer kırmızı bir renk oluşuyorsa ürobilinojeni yüksektir. Herhangi bir renk değişikliği olmaması ürobilinojenin normal düzeyde olduğunu gösterir.

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Metalleri aşındırabilir. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Sadece orijinal kabında saklayın. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

| Saklama sıcaklığı | Raf Ömrü |
|-------------------|----------|
| 15/25 °C | 2 yıl |

Kapak açıldıktan sonra, önerilen depolama koşullarında depolandığında miadı boyunca kullanılabilir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

| Ürün Adı | REF No | Stok Kodu | Ambalaj Şekli | Birim Ambalaj Hacmi |
|-------------------|--------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Ehrlich Çözeltisi | 3125 | 453125030100 | 125 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe | 125 ml |
| | | 453125030250 | 250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe | 250 ml |
| | | 453125020500 | 500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm | 500 ml |

SEMBOL ANAHTARI

| | | | |
|---|--|--|--|
|  REF Numarası |  Ürün Üretim Tarihi |  Ürün Depolama Sıcaklığı |  Üretici Bilgisi |
|  LOT Numarası |  Ürün Son Kullanma Tarihi |  Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın |  Ambalaj Geri dönüşüm bilgisi |
|  In Vitro Diagnostik | | | |



GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.