

KULLANIM KILAVUZU

ROSİN TROUSSEAU AYIRACI

	ÜRÜN ADI		: Rosin Trousseau Ayıracı	
	MARKASI		: GBL® Rose-Uri	
	ÜRÜN REF NO		: 3127	
	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Hacmi	Ambalaj
	453127030100	125 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	125 ml	
	453127030250	250 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	250 ml	
	453127020500	500 ml, HDPE Beyaz Kare Şişe 28 mm	500 ml	
	453127011000	1000 ml, HDPE Beyaz Kare Şişe 28 mm	1000 ml	

KULLANIM AMACI

İdrarda bilirubin aranmasında kullanılır.

TESPİT EDİLEN TÜRLER

Bilirubin varlığı.

FONKSİYONU

Ürün, tanı veya tanıya yardımcı olma amacıyla manuel kullanım için tasarlanmıştır

GEREKEN NUMUNE TÜRÜ

İdrar.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

Bilirubinin iyotla birleşerek yeşil renkli bir bileşik vermesi esasına dayanır.

İÇERİK BİLGİSİ

İyot, metil alkol.

KULLANIM ŞEKLİ

1. Temiz bir test tüpüne 4-5 ml idrar numunesi ekleyin.
2. Üzerine 1 ml **Rosin Trousseau Ayıracı (GBL® Rose-Uri Ref No:3127)** tüp kenarından yavaşça akıtılıp üstte tabakalandırılacak şekilde koyun.
3. İdrar ve ayıraç tabakalarının birleşme yerinde yeşil renkli bir halkanın görülmesi idrarda bilirubinin var olduğunu gösterir.

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Çok alevlenir sıvı ve buhar. Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir. Organlarda hasara yol açar. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Kabı sıkıca kapalı tutun. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. Maruz kalınma halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Rosin Trousseau Ayırıcı	3127	453127030100	125 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	125 ml
		453127030250	250 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	250 ml
		453127020500	500 ml, HDPE Beyaz Kare Şişe 28 mm	500 ml
		453127011000	1000 ml, HDPE Beyaz Kare Şişe 28 mm	1000 ml

SEMBOL ANAHTARI

 REF Numarası	 Ürün Üretim Tarihi	 Ürün Depolama Sıcaklığı	 Üretici Bilgisi
 LOT Numarası	 Ürün Son Kullanma Tarihi	 Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın	 Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
 In Vitro Diagnostik	 GHS02: ALEVLENİR	 GHS05: ZEHİRLİ	 GHS08: ZARARLI

**GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.