

KULLANIM KILAVUZU

PANDY AYIRACI

	ÜRÜN ADI		: Pandy Ayıracı
	MARKASI		: GBL® Rose-Uri
	ÜRÜN REF NO		: 3156
	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
	453156030050	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	50 ml
	453156030100	125 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	125 ml
	453156030250	250 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	250 ml
	453156020500	500 ml, HDPE Kare Beyaz Şişe 28 mm	500 ml

KULLANIM AMACI

Beyin omurilik sıvısında (BOS) kalitatif protein tetkiki için kullanılır.

TESPİT EDİLEN TÜRLER

Protein.

FONKSİYONU

Ürün, tanı veya tanıya yardımcı olma amacıyla manuel kullanım için tasarlanmıştır.

GEREKEN NUMUNE TÜRÜ

BOS.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

BOS'da bulunan proteinlerden globulinler, pandy reaktifi ile bulanıklık meydana getirir. Meydana gelen bulanıklık derecesi değerlendirilir.

İÇERİK BİLGİSİ

Fenol kristal.

UYGULAMA ŞEKLİ

- Saat camı içerisine 1 ml **Pandy Ayıracı (GBL® Rose-Uri Ref No:3156)** ekleyin ve saat camını siyah bir zemin üzerine yerleştirin.
- Saat camındaki Pandi ayırıcı üzerine 1 damla BOS damlatın.

Sonuç:

Belirgin bulutlanma veya şiddetli bulanıklık var ise	Pandy (+)
Belirgin bulutlanma veya şiddetli bulanıklık yok ise	Pandy (-)

Açıklama:

Hafif bulanıklık gözlemlenmesi normaldir. Pandy (+) sonuç BOS'ta globülin artışını gösterir

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Yutulması halinde zararlıdır. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Genetik hasara yol açma şüphesi var. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. DERİ (veya saç) İLE TEMASI HALİNDE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile kurulayın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Pandy Ayracı	3156	453156030050	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	50 ml
		453156030100	125 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	125 ml
		453156030250	250 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	250 ml
		453156020500	500 ml, HDPE Beyaz Kare Şişe 28 mm	500 ml

SEMBOL ANAHTARI

 REF Numarası	 Ürün Üretim Tarihi	 Ürün Depolama Sıcaklığı	 Üretici Bilgisi
 LOT Numarası	 Ürün Son Kullanma Tarihi	 Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın	 Ambalaj Geri dönüşüm bilgisi
 In Vitro Diagnostik	 GHS08: ZARARLI	 GHS05: AŞINDIRICI	 GHS07: TEHLİKE

**GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / Türkiye

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / Türkiye

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.