

KULLANIM KILAVUZU

SÜLFOSALİSİLİK ASİT ÇÖZELTİSİ %20

	ÜRÜN ADI	: Sülfosalisilik Asit Çözeltisi %20	
	MARKASI	: GBL® Rose-Uri	
	ÜRÜN REF NO	: 3388	
	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
	453388030100	125 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	125 ml
	453388030250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml
	453388020500	500 ml, HDPE Beyaz Kare Şişe 28 mm	500 ml

KULLANIM AMACI

İdrarda protein tetkiki amacıyla kullanılır.

TESPİT EDİLEN TÜRLER

Protein.

FONKSİYONU

Ürün, tanı veya tanıya yardımcı olma amacıyla manuel kullanım için tasarlanmıştır.

GEREKEN NUMUNE TÜRÜ

İdrar.

ÇALIŞMA PRENSİBİ:

Proteinlerin serbest amino asit gruplarının sülfosalisilik asit ile bağlanarak proteinlerin sülfosalisilat şeklinde çökmesi esasına dayanmaktadır.

İÇERİK BİLGİSİ

Sülfosalisilik asit.

UYGULAMA ŞEKLİ

1. Bir tüpün içerisine 3 ml idrar numunesi ekleyin.
2. Üzerine 3-4 damla **Sülfosalisilik Asit Çözeltisi %20 (GBL® Rose-Uri Ref No:3388)** ekleyin ve çalkalayın.
3. Protein varlığında bulanıklık görülür. Bulanıklığın nedeni, sülfosalisilik asit ile proteinlerin -NH₂ (amin) gruplarının bağlanması sonucu oluşan çözünmeyen komplekstir.

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Dikkat. Cilt tahrişine yol açar. Ciddi göz tahrişine yol açar. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. DERİ İLE TEMAS HALİNE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Sülfosalisilik Asit Çözeltisi %20	3388	453388030100	125 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	125 ml
		453388030250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml
		453388020500	500 ml, HDPE Beyaz Kare Şişe 28 mm	500 ml

SEMBOL ANAHTARIREF
NumarasıÜrün Üretim
TarihiÜrün
Depolama
Sıcaklığı

Üretici Bilgisi

LOT
NumarasıÜrün Son
Kullanma
TarihiÜrün
Kullanım
Kılavuzuna
BakınAmbalaj Geri
Dönüşüm
BilgisiIn Vitro
DiagnostikGHS07:
ZARARLI**GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.